

MEDCARE CONCENTRADO DESINFETANTE HOSPITALAR 5L



MEDCARE CONCENTRADO DESINFETANTE HOSPITALAR é um poderoso limpador e desinfetante sem perfume indicado para superfícies ambientais e artigos não críticos de serviços de saúde.



POSSUI DILUIÇÃO DE ALTA RENTABILIDADE E PROPORCIONA EFICIENTE AÇÃO BACTERICIDA (GRAM POSITIVAS E NEGATIVAS), VIRUCIDA E FUNGICIDA*.

SUA FÓRMULA POSSUI PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO E QUATERNÁRIO DE AMÔNIO DE QUINTA GERAÇÃO QUE SÃO CAPAZES DE LIMPAR, DESINFETAR E ALVEJAR.

O quaternário de amônio em sua formulação amplia o **PERÍODO DE DESINFECÇÃO DO PRODUTO**, mantendo desinfetante na superfície após a aplicação.

Sua **AÇÃO 3 EM 1** proporciona limpeza, desinfecção e alvejamento, economizando tempo, água e reduzindo custos operacionais.

Sua fórmula de **ALTO DESEMPENHO** tem eficácia comprovada e aprovada pela Anvisa. É exclusivo para serviços de saúde em geral.

*Testes conduzidos em laboratório com os microrganismos:

TABELA 1 - MICRORGANISMOS TESTADOS		
Microrganismos	Diluição	Tempo de contato (min)
<i>Candida albicans</i>	1:100	5
<i>Staphylococcus aureus</i>	1:100	5
<i>Salmonella enterica subsp enterica</i> serovar choleraesuis	1:100	5
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1:100	5
<i>Escherichia coli</i>	1:100	5
<i>Klebsiella Pneumoniae</i>	1:100	5
<i>Staphylococcus MRSA</i>	1:100	5
<i>Enterococcus Faecalis</i>	1:100	5
<i>Klebsiella Pneumoniae</i> Carbapenemase	1:100	5
<i>Acinetobacter Baumannii</i>	1:100	5
<i>Enterococcus faecium VRE</i>	1:100	5
<i>Candida auris</i>	1:100	15
<i>Trichophyton interdigitale Priestley</i>	1:100	15
<i>Mycobacterium smegmatis</i>	Puro	15
<i>Mycobacterium bovis</i>	Puro	15
<i>Clostridium Difficile</i>	Puro	15



3 EM 1

**5L RENDE
ATÉ 500L DE
DESINFECÇÃO**



Pág. 1

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS



ASPECTO

Líquido límpido



COR

Incolor



PH

2,1 a 2,6




PURO

COMPOSIÇÃO

- Cloreto de alquil dimetil benzil amônio + Compostos de amônio quaternário, di-alkildimetil, Cloretos; Peróxido de hidrogênio.
- Tensoativo não iônico
- Agente de controle de pH
- Sequestrante
- Estabilizantes
- Água

EMBALAGEM

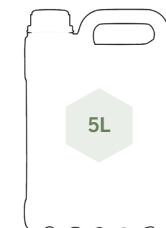

Bombona de Polietileno com 5L



MEDCARE CONCENTRADO DESINFETANTE HOSPITALAR 5L

**MED
CARE****PRO**

Fig. 2

MODO DE USO

PARA DESINFECÇÃO DE ARTIGOS NÃO CRÍTICOS:



LAVAR, ENXAGUAR E SECAR os artigos para redução da carga orgânica.



IMERGI-LOS na solução de acordo com as recomendações de diluição determinadas na tabela 1* de microrganismos testados.



Deixar agir pelo **TEMPO DETERMINADO** na tabela 1 de microrganismos testados*.

PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES FIXAS:



PREPARAR A SOLUÇÃO de acordo com as recomendações de diluição determinadas na tabela 1* de microrganismos testados.



Aplicar na **SUPERFÍCIE**.



Deixar agir pelo **TEMPO DETERMINADO** na tabela 1 de microrganismos testados*.



PRECAUÇÕES DE USO

CAUTION!
ANTES DE USAR,
LEIA AS
INSTRUÇÕES
DO RÓTULO.

ATENÇÃO! CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite a inalação ou aspiração. Evite o contato com a pele. Depois de utilizar este produto, remova as luvas, lave e seque as mãos. Não misturar com outros produtos. Não reutilizar a embalagem para outros fins. Usar luvas para sua aplicação. Usar máscaras para sua aplicação. Não utilizar para desinfecção de alimentos e água para consumo humano. Não aplicar sobre pessoas, alimentos e animais.

PRIMEIROS SOCORROS



EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS E PELE, **LAVAR IMEDIATAMENTE COM ÁGUA EM ABUNDÂNCIA DURANTE 15 MINUTOS.** SE A IRRITAÇÃO PERSISTIR CONSULTE O CENTRO DE INTOXICAÇÕES OU UM MÉDICO, LEVANDO A EMBALAGEM OU O RÓTULO DO PRODUTO. EM CASO DE INGESTÃO ACIDENTAL, NÃO INDUZIR O VÔMITO. CONSULTE O CENTRO E INTOXICAÇÕES OU UM MÉDICO IMEDIATAMENTE, LEVANDO A EMBALAGEM OU O RÓTULO DO PRODUTO. **EMERGÊNCIAS TOXICOLÓGICAS: 0800-701-0450.**

CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO



IMPORTANTE para conservação da qualidade do produto, manter o produto em sua embalagem original, em lugar fresco, protegido da luz e do calor. Proibido reutilizar a embalagem.



ÁGUA PODE FALTAR. NÃO DESPERDICE.



Atendimento ao consumidor. Ligue grátis: 0800 707 1103



Central de Intoxicação 0800 701 0450

unileverpro.com.br